

The SEGUFIX[®]-System

セグフィックス 保護ベルト



輸入販売元



松吉医科器械株式会社

<http://www.matsuyoshi.co.jp>

腹部用ベルトセット



- 「セグフィックス保護ベルト」シリーズの基本となる腹部用ベルトとボタン・ピン・キーのロックシステムを加えたセットです。
 - 腹部用ベルトは、ベッドからの転落防止や安静が必要な場合等に使用します。
 - 腹部用ベルトには、寝返り調整ベルトが付いており、取り付け位置で患者の姿勢保持や動きの制限ができます。
- ※腹部用ベルトを使用する際は、必ず寝返り調整ベルトを使用してください。

腹部用ベルトセット

ツイストロックセット

コード	規格	価格(税抜)
① 23-7601-00	S	¥37,000
② 23-7601-01	M	¥37,000
③ 23-7601-02	L	¥37,000

パテントロックセット

コード	規格	価格(税抜)
④ 23-7611-00	S	¥32,500
⑤ 23-7611-01	M	¥32,500
⑥ 23-7611-02	L	¥32,500

■構成

	腹部用ベルト	ツイストボタン&ピン	ツイストキー	パテントボタン&ピン	パテントキー
①	S 1	3	2		
②	M 1	3	2		
③	L 1	3	2		
④	S 1			3	2
⑤	M 1			3	2
⑥	L 1			3	2

上半身用ベルトセット



- 上半身用ベルトとボタン・ピンのセットです。
 - 上半身用ベルトは、腹部用ベルトを装着した状態で、患者さんの動きによる腹部用ベルトからのすり抜けを制限したい場合に使用します。
- ※上半身用ベルトは単体では使用できません。必ず腹部用ベルトと組み合わせて使用してください。

上半身用ベルトセット

ツイストロックセット

コード	規格	価格(税抜)
① 23-7602-00	S	¥11,500
② 23-7602-01	M	¥11,500
③ 23-7602-02	L	¥11,500

パテントロックセット

コード	規格	価格(税抜)
④ 23-7612-00	S	¥10,500
⑤ 23-7612-01	M	¥10,500
⑥ 23-7612-02	L	¥10,500

■構成

	上半身用ベルト	ツイストボタン&ピン	パテントボタン&ピン
①	S 1	1	
②	M 1	1	
③	L 1	1	
④	S 1		1
⑤	M 1		1
⑥	L 1		1

上半身用取付ベルトセット



- 上半身用取付ベルトとボタン・ピンのセットです。
 - 上半身用取付ベルトは、ベッドからの起き上がりを制限する必要がある場合に使用します。
- ※上半身用取付ベルトは単体では使用できません。必ず腹部用ベルトと上半身用ベルトと組み合わせて使用してください。

上半身用取付ベルトセット

ツイストロックセット

コード	規格	価格(税抜)
① 23-7603-00	2本組	¥11,500

パテントロックセット

コード	規格	価格(税抜)
② 23-7613-00	2本組	¥9,000

■構成

	上半身用取付ベルト	ツイストボタン&ピン	パテントボタン&ピン
①	1	2	
②	1		2

手用ベルトセット



ツイストボタン&ピン



パテントボタン&ピン

- 手用ベルトとボタン・ピンのセットです。
- 手用ベルトは、手の動きを制限する必要がある場合に使用します。
- ※手用ベルトは単体では使用できません。必ず腹部用ベルトと組み合わせて使用してください。

手用ベルトセット

ツイストロックセット

コード	規格	価格(税抜)
①23-7604-00	S	¥11,000
②23-7604-01	M	¥11,000
③23-7604-02	L	¥11,000


パテントロックセット

コード	規格	価格(税抜)
④23-7614-00	S	¥8,500
⑤23-7614-01	M	¥8,500
⑥23-7614-02	L	¥8,500

■構成

	手用ベルト	ツイストボタン&ピン	パテントボタン&ピン
①	S 2	2	
②	M 2	2	
③	L 2	2	
④	S 2		2
⑤	M 2		2
⑥	L 2		2

足用ベルトセット

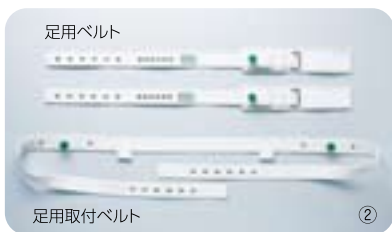

ツイストボタン&ピン



パテントボタン&ピン

- 足用ベルト、足用取付ベルトとボタン・ピンのセットです。
- 足用ベルト、足用取付ベルトは、足の動きを制限する必要がある場合に使用します。
- 足用取付ベルトは、足用ベルトを使用する際に必要なベッドへの取付ベルトです。
- ※足用ベルトと足用取付ベルトはそれぞれ単体では使用できません。必ず組み合わせて使用してください。

足用ベルトセット

ツイストロックセット

コード	規格	価格(税抜)
①23-7605-00	S	¥24,500
②23-7605-01	M	¥24,500
③23-7605-02	L	¥24,500

パテントロックセット

コード	規格	価格(税抜)
④23-7615-00	S	¥19,000
⑤23-7615-01	M	¥19,000
⑥23-7615-02	L	¥19,000

■構成

	足用ベルト	足用取付ベルト	ツイストボタン&ピン	パテントボタン&ピン
①	S 2	S 1	4	
②	M 2	M/L 1	4	
③	L 2	M/L 1	4	
④	S 2	S 1		4
⑤	M 2	M/L 1		4
⑥	L 2	M/L 1		4

全身用セット



腹部用ベルト



上半身用ベルト



ツイストロックシステム



手用ベルト



足用ベルト



パテントロックシステム

- 「セグフィックス保護ベルト」シリーズの基本となる腹部用ベルトをはじめ、上半身用ベルト、手用ベルト、足用ベルト、足用取付ベルトとボタン・ピン・キーのロックシステムを加えたセットです。
- 全身の動きを制限する際に必要な製品が含まれています。

全身用セット

ツイストロックセット

コード	規格	価格(税抜)
①23-7600-00	S	¥86,500
②23-7600-01	M	¥86,500
③23-7600-02	L	¥86,500


パテントロックセット

コード	規格	価格(税抜)
④23-7610-00	S	¥72,000
⑤23-7610-01	M	¥72,000
⑥23-7610-02	L	¥72,000

■構成

	腹部用ベルト	上半身用ベルト	手用ベルト	足用ベルト	足用取付ベルト	ツイストボタン&ピン	ツイストキー	パテントボタン&ピン	パテントキー
①	S 1	S 1	S 2	S 2	S 1	10	2		
②	M 1	M 1	M 2	M 2	M/L 1	10	2		
③	L 1	L 1	L 2	L 2	M/L 1	10	2		
④	S 1	S 1	S 2	S 2	S 1			10	2
⑤	M 1	M 1	M 2	M 2	M/L 1			10	2
⑥	L 1	L 1	L 2	L 2	M/L 1			10	2


単品パーツ

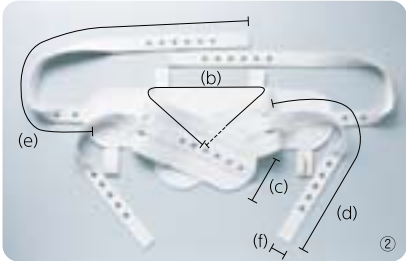

腹部用ベルト

コード	規格	価格(税抜)
①23-7621-00	S	¥27,000
②23-7621-01	M	¥27,000
③23-7621-02	L	¥27,000

	(a)全長	(b)腹部ベルト有効長	(c)腹部ベルト幅	(d)寝返り調整ベルト長	(e)ベッド取付ベルト長	(f)ベルト幅
①	222cm	51~83cm	14cm	65cm	73cm	4.5cm
②	268cm	76~118cm	18cm	65cm	96cm	4.5cm
③	268cm	115~157cm	18cm	65cm	96cm	4.5cm

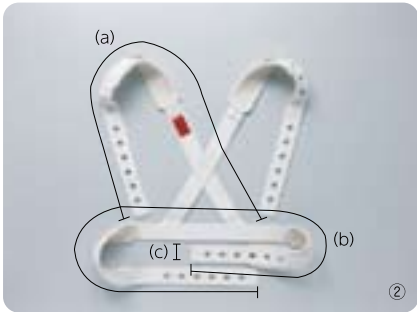

上半身用ベルト

コード	規格	価格(税抜)
①23-7622-00	S	¥9,500
②23-7622-01	M	¥9,500
③23-7622-02	L	¥9,500


	(a)肩部ベルト長	(b)下部ベルト長	(c)ベルト幅
①	85cm	118cm	4.5cm
②	100cm	145cm	4.5cm
③	117cm	165cm	4.5cm



上半身用取付ベルト

コード	規格	価格(税抜)
①23-7623-00	2本組	¥6,700


	(a)全長	(b)ベルト幅
①	113cm	4.5cm

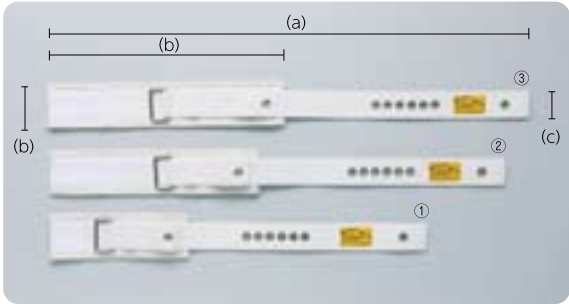

手用ベルト

コード	規格	入数	価格(税抜)
①23-7624-00	S	1本	¥3,000
②23-7624-01	M	1本	¥3,000
③23-7624-02	L	1本	¥3,000


	(a)全長	(b)ハンドカフ寸法	(c)ベルト幅
①	63cm	23×7.5cm	4.5cm
②	77cm	35×7.5cm	4.5cm
③	81cm	40×7.5cm	4.5cm

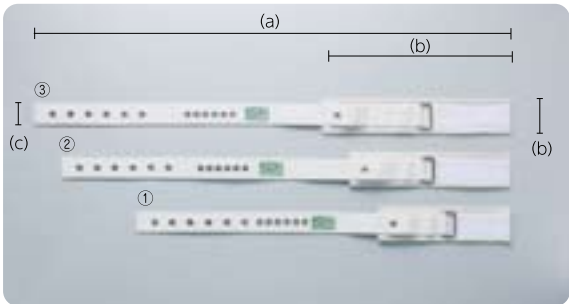

足用ベルト

コード	規格	入数	価格(税抜)
①23-7625-00	S	1本	¥3,500
②23-7625-01	M	1本	¥3,500
③23-7625-02	L	1本	¥3,500

	(a)全長	(b)フットカフ寸法	(c)ベルト幅
①	83cm	29×7.5cm	4.5cm
②	100cm	36×7.5cm	4.5cm
③	106cm	42×7.5cm	4.5cm

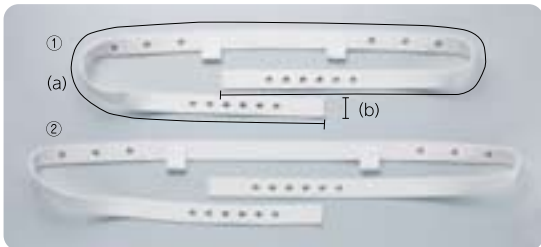

足用取付ベルト

コード	規格	価格(税抜)
①23-7626-00	S	¥7,500
②23-7626-01	M/L	¥7,500



	(a)全長	(b)ベルト幅
①	222cm	4.5cm
②	268cm	4.5cm

■ セグフィックス カラー識別システム

「セグフィックス保護ベルト」は、使用する部位に応じて『カラー識別システム』を採用しています。

赤・黄・緑の3色で使用する部位を分類。

各製品には、それぞれのカラー識別ラベルが表示されています。
ラベルのカラーによって製品の使用部位を容易に識別できますので、
使用時の製品の混在や使用部位の間違いを防ぎます。

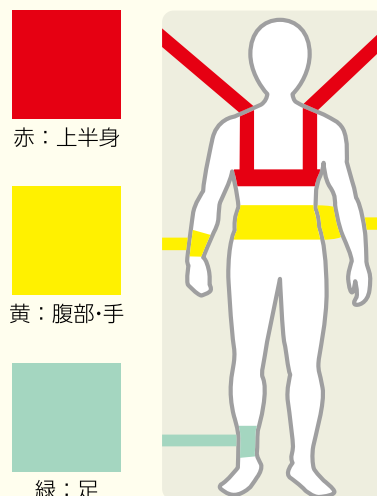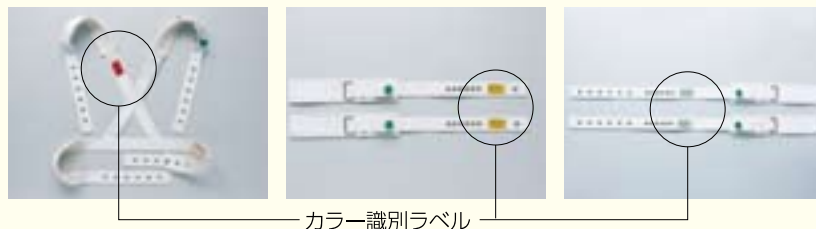

■ セグフィックス ロックシステム

ベッドへの取り付けやベルトの装着時に使用する、ツイストロックシステムとパテントロックシステムは、製品をより安全にご使用頂くためのセグフィックス独自のロックシステムです。

どちらのタイプも、ピンにボタンを差し込むことで簡単にロックできます。

ロックされた状態で、ボタンをピンから外すことはできません。

ボタンをピンから外す場合は、それぞれ専用キーを使用します。

【ツイストロックシステム】



ツイストロックシステム

品名	コード	サイズ	価格(税抜)
①ツイストボタン&ピン	23-7630-00	—	¥2,700
②ツイストボタン	23-7631-00	φ2.3×H1.3cm	¥1,800
③ツイストピン	23-7632-00	3.6×3.6×H3.4cm	¥1,000
④ツイストキー	23-7633-00	φ2.7×H5.7cm	¥1,600

【パテントロックシステム】



パテントロックシステム

品名	コード	サイズ	価格(税抜)
①パテントボタン&ピン	23-7640-00	—	¥1,400
②パテントボタン	23-7641-00	φ2.5×H1.3cm	¥1,000
③パテントピン	23-7642-00	φ2.3×H3.4cm	¥500
④パテントキー	23-7643-00	φ2.2×H3.7cm	¥1,400

【ロックシステム 使用上の注意】

- ツイストロックシステムとパテントロックシステムに互換性はありません。異なるボタン・ピン・キーを組み合わせで使用することはできません。
- 他社製品と組み合わせで使用することはできません。
- ご使用前に必ず、ボタン・ピン・キーの組み合わせが正しいか、適切にロックができるか、キーを使用して適切に取り外しができるか、確認してください。取り外しが適切にできない場合は、直ちに新しいボタン・ピン・キーに交換してください。
- ロックシステムは水濡れに注意してご使用ください。水に濡れると適切にロック・取り外しができなくなります。
- ロックシステムは継続使用により劣化を招く可能性があります。ご使用前に必ずロック状態を確認し、適切にロック・取り外しができない場合は、直ちに新しいボタン・ピン・キーに交換してください。
- ボタンに強い力が加わったり、常に引っ張られるような使用状況において、適切なロック状態を保つことや取り外しが困難になる可能性があります。
- 正しく取り外しできない場合、またキーを紛失した場合は、ベルトをハサミやベルトカッターで切断して「セグフィックス保護ベルト」を取り外してください。

注意事項

※ご使用前に必ずお読みください。

【注意事項 ～ご使用条件～】

- 「セグフィックス保護ベルト」は、医療施設において、ベッドからの転落防止や動きの制限、姿勢保持等、患者の安全対策の一つの手段として使用される製品です。
- 医療法等の関連する法令や告示等に従い、使用環境が整備されている医療施設において、医師が必要と判断する場合に、医師の管理・監督下で使用できます。
- 使用方法等を十分に理解し、取り扱いを熟知した医師・看護師がご使用ください。
- 個人や在宅での使用はできません。
- ご使用の際は、各施設にて定められたガイドラインや手順・ルール等に従って、適切に使用してください。
- 本製品を使用中は、見回りの回数を増やす等、常に患者の状態と製品の状態を監視・確認してください。異常がある場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品を使用する際は、上記使用条件を守り、適切に使用してください。誤って使用すると、重大な怪我を引き起こしたり、生命に関わる事故に繋がる可能性があります。

【注意事項 ～ご使用の前に～】

- ご使用の際は、患者や製品に損傷をきたす可能性のある物（眼鏡、腕時計、ネックレス等の装飾品、鋭利な物等）、ロックシステムに影響を及ぼす磁気を有する物を周囲に置かないでください。
- 本製品は耐火素材ではありません。タバコ等の火気を近づけたり、火気の近くで使用しないでください。
- 本製品のロックシステムには磁気を使用しています。ペースメーカー等、磁気の影響を受ける機器を使用している患者には使用しないでください。また磁気の影響を受ける医療機器等の近くで使用しないでください。
- 本製品を分解・改造したり、また修理を行って使用しないでください。
- 本製品は、他社製品との併用やパーツを混在して使用することはできません。他社製品と一緒に使用しないでください。
- ご使用前に、必ず本体ベルトの点検・確認を行い、不具合のある製品は使用しないでください（製品の破損、劣化、ホツレ等）。
- 不具合のある製品を使用すると重大な事故に繋がる可能性があります。
- ご使用前に、必ずロックシステムの点検・確認を行い、不具合のある製品は使用しないでください（ボタン・ピン・キーの組み合わせ、正しくロックするか、キーにより正しく解除できるか等）。
- 不具合があると、正しくロックされない、正しくロックが解除できない等の現象により、重大な事故に繋がる可能性があります。

【注意事項 ～使用上の注意～】

- 医師の指示に従い、使用目的や患者の状態により、使用する製品および使用方法を決定してください。
- 患者の体型や使用する部位に際して適切なサイズを使用してください。また、ベルトを留める際も使用方法や患者の体型に応じて適切な位置で留めてください。サイズの合わない製品を使用したり、ベルトを留める位置が適切でないと、重大な事故に繋がる可能性があります。
- ご使用の際は製品を正しく装着し、各ベルトの緩みが適切な状態に保たれているか、定期的に確認を行ってください。

ベルトを締めすぎると呼吸や循環を妨げ、重大な事故に繋がる可能性があります。

ベルトが緩すぎるとベルトからのすり抜けや絡まり、ベッドからの転落等、重大な事故に繋がる可能性があります。

- 本製品の使用中は、常に患者の状態を監視し、異常がある場合は直ちに使用を中止してください。
- 災害等の緊急時には、ベルトをハサミやベルトカッターで切断して製品を取り外してください。

【注意事項 ～ベッド取り付け時の注意～】

- ベッドに取り付ける際は、取付ベルトをベッドフレームの適切な位置に取り付け、ロックシステムでしっかりと留めてください。
- 取付ベルトは、ずれたり滑らないようしっかりとベッドに取り付けてください。適切に取り付けられていないと、ベッドからの転落等の重大な事故に繋がる可能性があります。
- 取付ベルトは、ベッドの可動に対して影響を受けない位置に取り付けてください。
- 高さ調節やギャッチ機能のあるベッドに取り付ける場合は、ベッドを可動させずに使用することで、より安全性が高まります。
- 取付後に、ベッドの高さ調節やギャッチ機能を使用する可能性のある場合、ベッド機能への影響や可動時のベッドフレームの動きに伴う製品への影響、ベルトの締め付けや緩み等を十分に検討・確認した上で、取り付け位置を決定してください。
- ベッドサイドレールを使用する際は、必ず先にサイドレールを設置した後に製品を取り付けてください。

【お手入れの注意】

- お手入れの際は、必ず本体ベルトからロックシステムを全て取り外し、各パーツごとに適切なお手入れを行ってください。

■本体ベルト

洗濯:可(液温95℃以下、液温が低い方が劣化が抑えられます)
漂白剤:不可
アイロン:不可
ドライクリーニング:不可
乾燥機:可(低温で弱回転の方が劣化が抑えられます)

- 洗濯の際には、必ずロックシステムを全て取り外していることを確認してください。
- 本体ベルトは洗濯により、約8%収縮する可能性があります。
- 洗剤は強力タイプは使用しないでください。弱性・中性タイプを使用してください。
- 柔軟剤は使用しないでください。
- 洗濯による劣化を抑えるため、ネット使用をおすすめします。
- 手用、足用の面ファスナー部は、劣化を抑えるため、留めた状態での洗濯をおすすめします。
- お手入れの後は、製品の破損・劣化・ホツレ等がないか、必ず確認してください。

■ロックシステム

- ロックシステムの各部品は洗濯できません。水濡れに注意して汚れを拭き取ってください。

■継続的な製品の使用

- 本体ベルト・ロックシステムは、製品の特性上、継続的な使用による製品への負荷や繰り返しの洗濯等により、破損、擦り切れ、ホツレ等の劣化を招く可能性があります。
- 製品を安全にご使用頂くために、製品の状態に応じて、定期的な買い替えをおすすめします。

〈輸入販売元〉



松吉医科器械株式会社

<http://www.matsuyoshi.co.jp>

本社 〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階
東京第一営業所 〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階
東京第二営業所 〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階
東京第三営業所 〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階
札幌営業所 〒001-0017 北海道札幌市北区北17条西4丁目1-1 202号室
仙台営業所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-7-17 ベルザ仙台5階
名古屋営業所 〒465-0095 愛知県名古屋市中区東区高社2-97 ニッチェウハイツ1階
大阪営業所 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-26 船場ISビル8階
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10 南近代ビル6階
※製品の価格・仕様は、2013年4月現在のものです。

TEL : 03-5816-8819
TEL : 03-5816-8801
TEL : 03-5816-8802
TEL : 03-5816-8803
TEL : 011-709-5566
TEL : 022-395-6705
TEL : 052-769-1610
TEL : 06-4708-6171
TEL : 092-292-3280